


1. Nettoyer

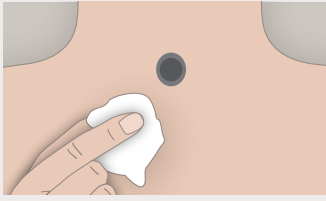


Nettoyer la peau autour de votre trachéostome avec le Provox Cleaning Towel ou avec de l'eau et du savon (non dégraissant). Laissez sécher la peau.

Assurez-vous que la peau est propre et exempte de mucus, de dissolvants de colle et de lotions pour la peau. Laissez la peau bien sécher. Lors du nettoyage de la peau, veillez à ce qu'aucune particule/liquide ne pénètre dans le trachéostome.

Conseil pour le nettoyage : Tondre/raser tous les poils autour de la zone d'application.

2. Préparer

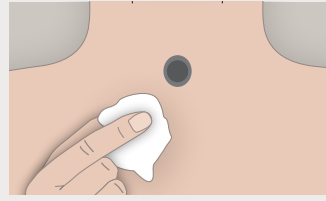


Appliquer Provox Skin Barrier si nécessaire et laisser sécher. Provox Skin Barrier laisse une couche protectrice sur la peau.

Pour Night Adhesive, ne portez rien d'autre sur la peau car sinon, l'adhérence et l'efficacité peuvent être compromises.


Conseil pour la préparation : si vous avez besoin d'une fixation forte, vous pouvez utiliser Provox Silicone Glue. Provox Silicone Glue ne doit pas être utilisé avec Night Adhésif !

3. Appliquer

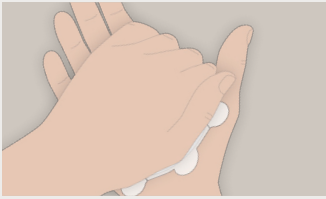


a) Frottez l'adhésif entre vos mains pour la réchauffer.


L'adhésif Provox Life Night n'a pas besoin d'être préchauffé.

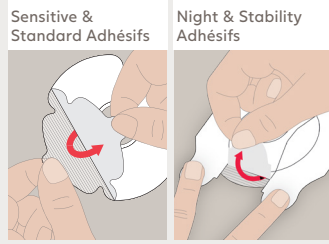

b) Retirez le film de protection. Pour Night et Stability Adhésifs, retirez d'abord le film de protection central, puis les films de protection latéraux une fois que la partie centrale est collée à la peau.

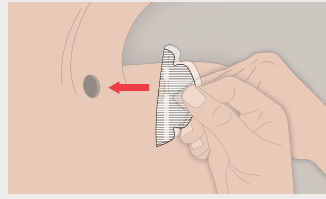

c) Appliquez l'anneau de l'adhésif aussi près que possible de votre trachéostome. Maintenez votre cou dans une position neutre, ne tirez pas sur l'adhésif et ne l'étirez pas.

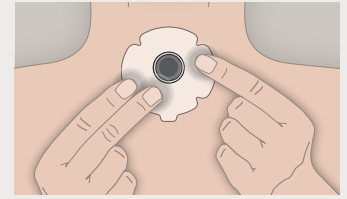


d) Massez soigneusement l'adhésif sur la peau. Commencez par le contour du trachéostome et massez doucement vers l'extérieur. Enfin, massez l'ensemble de l'adhésif.

Conseils pour la application:

- Évitez les espaces et les plis qui peuvent permettre au mucus de s'infiltrer entre l'adhésif et la peau, provoquant ainsi des fuites d'air ainsi que des irritations de peau.
- Ne parlez pas trop tôt après avoir appliqué l'adhésif ; laissez l'adhésif adhérer à votre cou pendant environ 15 minutes si possible avant de parler.
- Ne touchez pas la couche collante de votre adhésif lorsque vous l'appliquez sur votre cou, car cela réduirait l'adhérence.

4. Retirer

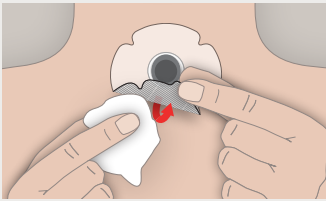

Commencez par la languette de décollement situé au bas de l'adhésif, retirez-le lentement et délicatement, en maintenant la peau pendant que vous le décollez. Pour les adhésifs Standards et de Stability,

appliquer d'abord Provox Adhesive Remover sur l'adhésif. Attendez quelques secondes, puis soulevez la languette pour détacher l'adhésif. Utilisez la languette Remove pour détacher complètement l'embase.

Retirer la adhésif Provox Life Night avec un lingette humide.

Provox Adhesive Remover ne doit pas être utilisé avec la adhésif Provox Life Night.



Conseil de retrait : Utiliser une lingette Adhesive Remover Provox pour faciliter le retrait. Vous pouvez aussi humecter une compresse d'eau et la passer sur votre adhésif.

Conseils et astuces pour une meilleure étanchéité

- Essayez de ne pas parler trop fort ou avec trop d'air.
- Retirez votre HME de l'adhésif lorsque vous devez tousser.
- Tenez toujours la plaque de base avec deux doigts lorsque vous retirez le HME.
- Après avoir toussé, retirez soigneusement le mucus et ne laissez pas le mucus s'infiltrer sous l'adhésif.

Comment minimiser les irritations cutanées

- Évitez les changements répétés d'adhésif, parlez-en à votre médecin si vous changez d'adhésif plus de 3 fois dans la journée.
- Ne laissez pas les adhésifs en place trop longtemps. Établissez une routine de changement qui optimise la sécurité de l'étanchéité pendant une journée entière, en permettant des changements programmés à un moment pratique et hygiénique de la journée.

Provox Life Sensitive Adhesive

Sensitive Adhesive est un adhésif respectueuse de la peau pour tous les patients. Elle offre une bonne étanchéité.




Provox Life Night Adhesive

Night Adhesive est un adhésif apaisant et confortable pour les patients dont la peau est irritée ou blessée.



Provox Life Standard Adhesive

Standard Adhesive est un adhésif solide et flexible pour les patients à la peau saine.

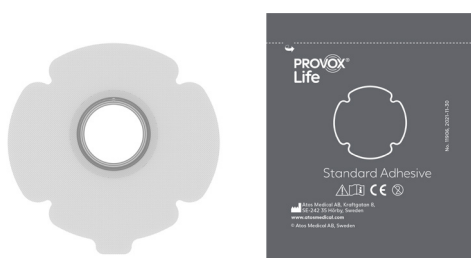

Non recommandé après une opération.

Provox Life Stability Adhesive

Stability Adhesive offre un soutien ferme aux patients qui parlent souvent, qui ont une trachéostomie profonde ou qui parlent les mains libres.



Non recommandé après une opération.

	Description
	Provox Cleaning Towel Pour nettoyer la peau avant l'application d'un adhésif
	Provox Skin Barrier Laisser un film protecteur sur la peau
	Provox Adhesive Remover Pour retirer l'adhésif
	Provox Silicone Glue Améliore l'adhérence entre la peau et l'embase

Siège social :
Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17
SE-215 32 Malmö, Sweden
T. +46 (0) 415 198 00
@info@atosmedical.com

Fabricant :
Atos Medical AB
Kraftgatan 8
SE-242 35 Hörby, Sweden

Suisse :
Atos Medical Branch Office
Seefeldstrasse 35
8008 Zürich
T. +41 44 380 60 90
@ info.ch@atosmedical.com
www.atosmedical.ch

Lisez toujours le mode d'emploi avant d'utiliser l'un des produits. Vous trouverez les modes d'emploi sur www.atosmedical.com.

© Coloplast A/S. All rights reserved. Atos and the Atos Medical logo are trademarks of Coloplast A/S.

Atos Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com